

ミニスポイト取扱説明書
(必ずお読み下さい)

株式会社アツザワプロテーゼ

ミニスポイトは、装着しているプロテーゼを取出す時に使用するものです。

(使用方法)

1. ミニスポイトの吸着部分を水で濡らします。
2. ミニスポイトを右手に持ち、プロテーゼの中央に吸着させます。
3. 上瞼眼を左手で上方へ上げ、プロテーゼも上方へ少し上げます。
4. 下瞼眼を左手で下方へ下げて、プロテーゼ下縁を外し、下へ引き抜く様に取り出します。

(注意事項)

1. プロテーゼの取外し以外には使用しないで下さい。万一眼球に直接ミニスポイトを吸着させた時は、ただちに眼科医を受診して下さい。
2. 材質はゴムで出来ていますので、食べられません。
3. 吸着が悪くなったら寿命です。新品と交換して下さい

